

**Die neue Schnelltest-Generation!**

## INTEX<sup>®</sup>-CRP Card Test quantitativ


Schnelltest zur quantitativen Bestimmung von CRP im Vollblut

**Schnelle und zuverlässige Diagnose – sofortige Therapie!**

Die Messung des CRP-Wertes ist eine anerkannte und etablierte Methode zur Überwachung einer Entzündungsreaktion. Die CRP-Konzentration im Blut ist ein sehr empfindlicher Indikator. Aufgrund der kurzen Reaktions- und Halbwertszeit wird eine Änderung der Entzündungsreaktion sehr rasch angezeigt. Die CRP-Messung ist gegenüber der Messung der Blutsenkungsgeschwindigkeit vor allem bei Kindern von Vorteil, da die benötigte Blutmenge geringer, die Testdauer kürzer ist und ein Ansprechen auf eine Therapie rascher beobachtet werden kann.

### Testeigenschaften

- Sandwich-Immunoassay
- Zuverlässiges Resultat in 5 Minuten
- Untersuchungsmaterial: Kapillarblut, Heparinblut oder EDTA-Blut
- Übereinstimmung mit anderen Schnelltests: 90%
- Sensitivität: 100%; Spezifität: 94% (bei 8 mg/L cut off)
- Erforderliche Probenmenge: 5 µL
- Nachweisgrenze: 8 mg/L
- Quantitatives Ergebnis mit **INTEX<sup>®</sup> Densitometer**
- Messbereich: **8 – 200 mg/L**

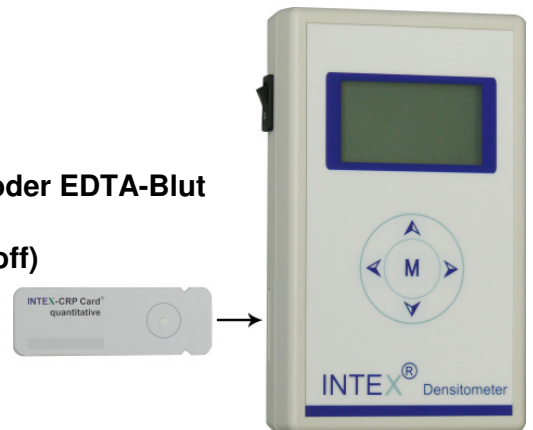


**NEU!**

### Testdurchführung

- ① 5 µL Blut entnehmen und verdünnen.
- ② 20 µL des verdünnten Blutes auf das Testfeld geben. Kurz warten und weitere 20 µL auftragen.
- ③ Gold-Konjugat in 2 Schritten à 20 µL auftragen.
- ④ Zweimal 20 µL Waschbuffer auftragen.
- ⑤ Quantitative Auswertung mit INTEX<sup>®</sup> Densitometer.


Kapillare mit 5 µL Blut

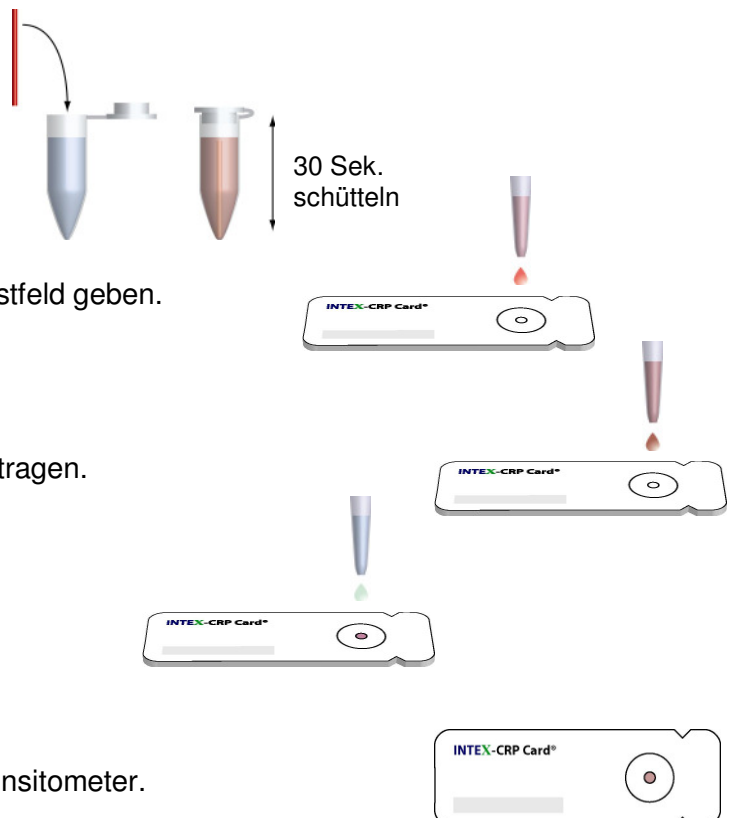

## Ihre Vorteile

- Geringe Probenmenge
- Schnelles Resultat
- Einfache Handhabung

## CRP-Spiegel bei verschiedenen Krankheiten

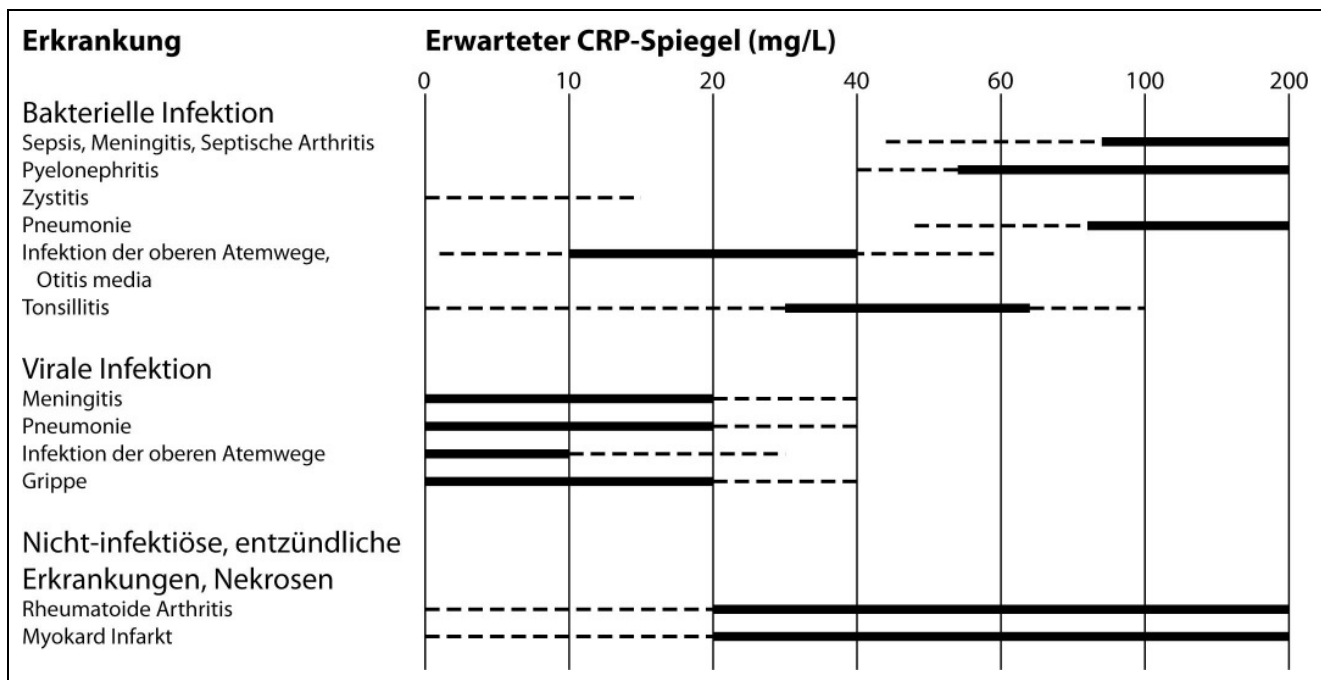

Danesh, J., et. al. 2004. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease. *NEJM*. 350:1387-97.

Gabay, C., and Kushner, I. 1999. Acute-Phase Proteins and other systemic responses to inflammation. *NEJM*. 340:448-54.

Pepys, M.B., and Hirschfield, G.M. 2003. C-reactive protein: a critical update. *J. Clin. Invest.* 111:1805-1812.

INTEX®-CRP Card Test	▼ Inhalt	REF Produktnummer
	20 Testkarten	CRPQ3520
quantitativ	50 Testkarten	CRPQ3550



**INTEX®**  
Diagnostika

### INTEX® Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77  
CH-4132 Muttenz  
Tel. (0041) 61 465 90 70  
Fax (0041) 61 465 90 71  
service.ch@intex-diagnostika.com

### INTEX® Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435  
DE-79576 Weil am Rhein  
Tel. (0049) 7621 940 90 80  
Fax (0049) 7621 940 90 84  
service@intex-diagnostika.com

### IDSAN® Kft.

Árpád u. 3/b. f.dsz. 1  
HU-1195 Budapest  
Tel. (0036) 1 357 65 98  
Fax (0036) 1 357 65 99  
intex@t-online.hu

[www.intex-diagnostika.com](http://www.intex-diagnostika.com)

Vertrieb Österreich: Mag. Doskar Pharm. Produkte, Schottenring 14, A-1013 Wien, Tel: (0043) 1 535 37 24-0, Fax: (0043) 1 535 37 24-24