

INTEX[®]-CRP Card Test


Test rapide semi-quantitatif pour la détermination de la CRP dans le sang complet

Diagnostic rapide et fiable – thérapie immédiate!

La mesure de la CRP est une méthode reconnue et établie dans le suivi de réactions inflammatoires. La concentration de CRP dans le sang est un indicateur très sensible. En raison d'une demi-vie et d'un temps de réaction très court, l'évolution du processus inflammatoire est visible très rapidement. Comparée à la vitesse de sédimentation, la mesure de la CRP a pour avantage – surtout chez les enfants – de nécessiter une moindre quantité de sang et une durée de test réduite. La réaction à la thérapie peut ainsi être observée plus rapidement.

Caractéristiques du test


- Sandwich-Immunoassay
- Résultat fiable en 5 minutes
- Quantité nécessaire d'échantillon: 5 μ L
- Champ de mesure optimal: 10 – 200 mg/L
- Limit de détection: 5 mg/L
- Résultat visuel semi-quantitatif
- Matériel d'examen: sang capillaire, sang hépariné ou EDTA
- Corrélation avec d'autres tests rapides: 90%
- Sensitivité: 100%; spécificité: 94% (cut-off 10 mg/L)

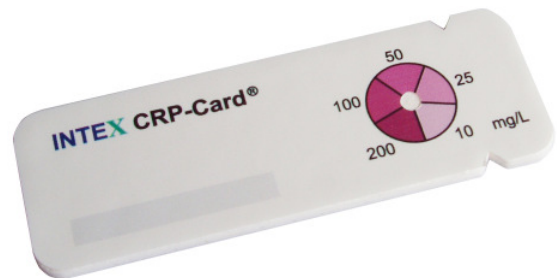

Mode d'emploi

- 1 Prélever et diluer 5 μ L de sang.
- 2 Déposer 20 μ L de sang dilué dans le champ de test. Attendre brièvement et ajouter encore 20 μ L.
- 3 Ajouter en deux fois 20 μ L de conjugué gold.
- 4 Ajouter en deux fois 20 μ L de solution tampon.
- 5 Lire le résultat.


capillaire avec
5 μ L de sang

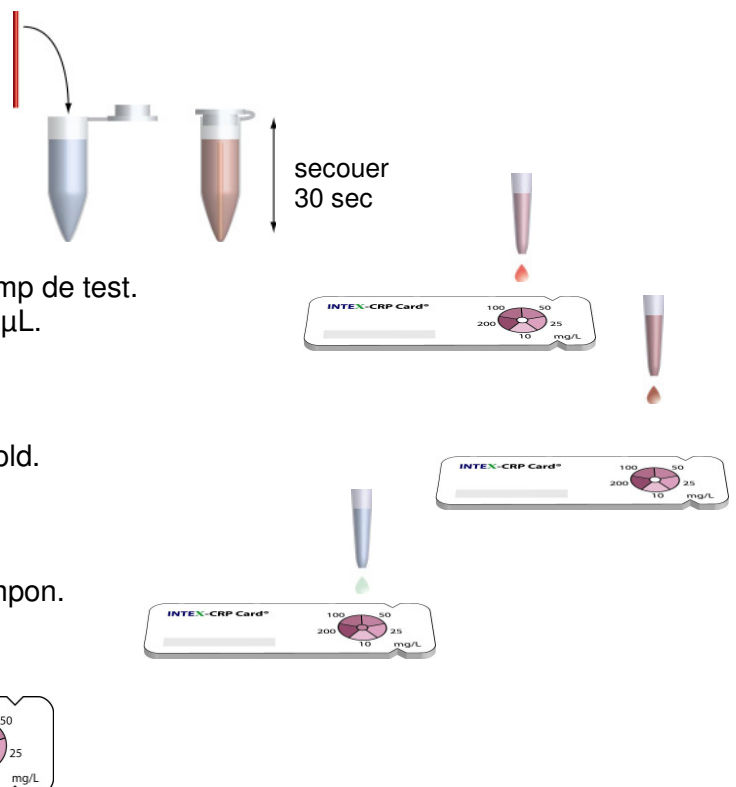

Vos avantages

- Nécessite peu de sang (échantillon)
- Résultat rapide
- Réalisation simple

Taux CRP pour différentes maladies

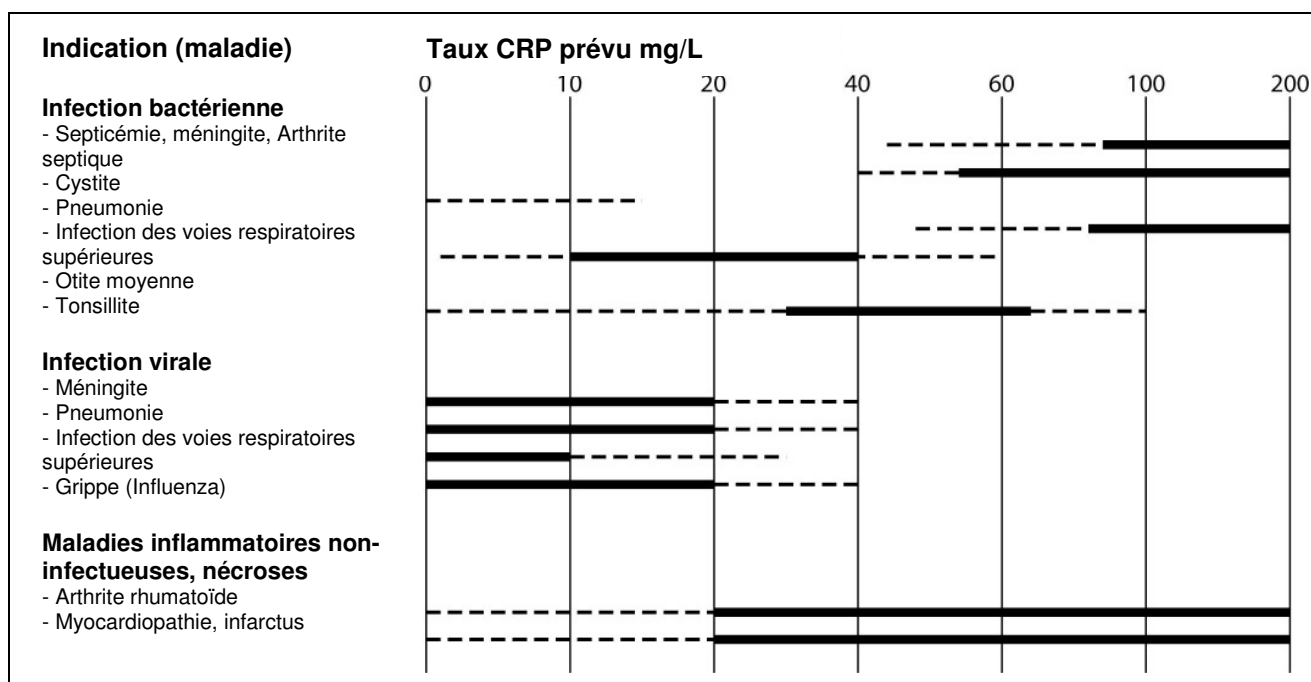

Danesh, J., et. al. 2004. C-reactive protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart disease. *NEJM*. 350:1387-97.

Gabay, C., and Kushner, I. 1999. Acute-Phase Proteins and other systemic responses to inflammation. *NEJM*. 340:448-54.

Pepys, M.B., and Hirschfield, G.M. 2003. C-reactive protein: a critical update. *J. Clin. Invest.* 111:1805-1812.

INTEX®-CRP Card Test semi-quantitatif	▽ Contenu	REF Référence article
	20 cartes de test	CRP3020
	50 cartes de test	CRP3050



Pour de plus amples informations, veuillez contacter:

INTEX®
Diagnostika

INTEX® Pharmazeutika AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX® Diagnostika

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

INTEX® Pharma Hungary Kft.

Árpád u. 3/b. fsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com

Distribution Autriche: Mag. Doskar Pharm. Produkte, Schottenring 14, A-1013 Wien, Tel: (+43) 1 535 37 24-0, Fax: (+43) 1 535 37 24-24