

INTEX[®] *Helicobacter pylori* Test

Schnelltest für den Nachweis von IgG Antikörpern gegen *Helicobacter pylori* in Vollblut, Serum oder Plasma

Schnelle und zuverlässige Diagnose – sofortige Therapie!

Der INTEX[®]-*Helicobacter pylori* Test ist ein schneller, visueller Einschritttest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen *H. pylori* in Vollblut, Serum oder Plasma. *H. pylori* ist der Haupterreger von Gastritis und Magengeschwüren. Es gilt ausserdem heute als gesichert, dass *H. pylori* an der Entstehung von Magenkrebs beteiligt ist. Die frühzeitige Erkennung ist entscheidend für die erfolgreiche Bekämpfung und Prophylaxe.


Ihre Vorteile

- **Qualitativer Schnelltest**
- **Mit Serum, Plasma oder Vollblut durchführbar**
- **Einfache Handhabung**
- **Genauere Resultate innerhalb von 3-5 Minuten**
- **Lagerung bei Raumtemperatur bis zu 18 Monate**
- **Eingebaute Funktionskontrolle**



Testdurchführung

- ① 20 µL Serum oder 20-40 µL Vollblut in die Probenöffnung pipettieren.
- ② 3-4 Tropfen Entwicklungspuffer in die Probenöffnung geben.
- ③ Nach 3-5 Minuten Ergebnis ablesen.

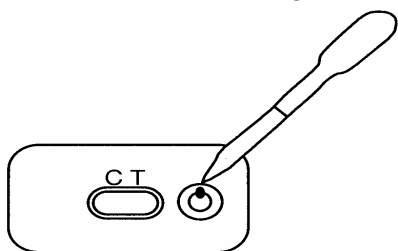

INTEX[®]-*Helicobacter pylori* Test



Negativ



Positiv

Vergleichsstudie

Zur Beurteilung des INTEX[®]-*Helicobacter pylori* Tests wurde eine Studie mit Seren von 319 Patienten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit den Resultaten parallel durchgeführter Biopsien verglichen.

Der Vergleich mit dem INTEX[®]-*Helicobacter pylori* Test zeigte folgendes Ergebnis:

| | INTEX Positiv | INTEX Negativ | Gesamtzahl Tests |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Biopsie Positiv | 202 | 14* | 216 |
| Biopsie Negativ | 20** | 83 | 103 |
| Gesamt | 222 | 97 | 319 |

Proben, die unterschiedliche Ergebnisse zeigten, wurden mit einem weiteren kommerziell erhältlichen Vergleichstest untersucht:

* Der Vergleichstest zeigte bei den 14 INTEX negativen Proben folgendes Ergebnis:
1 negativ; 3 +/-; 10 positiv.

** Der Vergleichstest zeigte bei den 20 INTEX positiven Proben folgendes Ergebnis:
15 positiv; 1 +/-; 4 negativ.

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Diagnostische Sensitivität: | (202/216) | 93.5% |
| Diagnostische Spezifität: | (83/103) | 80.6% |
| Korrelation: | (285/319) | 89.3% |

| | | |
|--|------------------|---------|
| INTEX[®]-<i>Helicobacter pylori</i> Test | ▼ | REF |
| | 10 Testkassetten | SK81010 |
| | 20 Testkassetten | SK81020 |



INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] Kft.

Árpád u. 3/b. fsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com