

INTEX[®] *Helicobacter pylori* Test

Test rapide pour la détermination des anticorps IgG contre *l'helicobacter pylori*

Diagnostic rapide et fiable – traitement immédiat!

Le *Helicobacter pylori* est le germe principale responsable des gastritis et ulcères de l'estomac. Il est de plus prouvé aujourd'hui que cette bactérie est également responsable du développement du cancer de l'estomac. Un dépistage précoce est déterminant du succès du traitement et est aussi prophylactique.

Avantages

- Test rapide qualitatif.
- Exécution possible avec sérum / plasma ou sang capillaire / veineux.
- Manipulation facile.
- Résultats clairs, indubitables et précis en 3-5 minutes.
- Stockage jusqu'à 15 mois à température ambiante.
- Dispositif de contrôle intégré.




Mode d'emploi

Déposez 20 µL or 20-40 µL de sang total dans l'ouverture de la cassette de test.

Ajoutez 3-4 gouttes de tampon.

Lisez le résultat après 3-5 minutes.

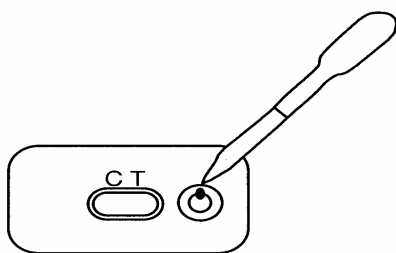

INTEX-*Helicobacter pylori* Test



Négatif



Positif

Etude comparative

Une étude concernant la sensibilité et la spécificité du test INTEX-*Helicobacter pylori* a été effectuée avec 319 personnes. Les résultats ont été comparés à ceux des deux biopsies parallèlement faites sur les mêmes 319 personnes.

La comparaison avec INTEX-*Helicobacter pylori* Test:

	INTEX Positif	INTEX Négatif	Nombre de Tests
Biopsie Positif	202	14*	216
Biopsie Négatif	20**	83	103
Total	222	97	319

Les échantillons qui ont donné des résultats divergents ont été comparés avec un autre test commercialisé:

* La comparaison avec les 14 tests INTEX négatifs a donné les résultats suivants:

1 négatif; 3 +/-; 10 positifs

** La comparaison avec les 21 tests INTEX positifs a donné les résultats suivants:

16 positifs; 1 +/-; 4 négatifs

Sensibilité (202/216) 93.5%

Spécificité (83/103) 80.6%

Corrélation (285/319) 89.3%

INTEX[®] -<i>Helicobacter pylori</i> Test	▼	REF
	10 cassettes de test	SK81010
	20 cassettes de test	SK81020



INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika GmbH

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com