

GRAVI-HCG

(Streifentest)

In vitro Diagnostikum für medizinisches Fachpersonal

Testanleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

Einführung:

Der INTEX[®] GRAVI-HCG (Streifentest) ist ein immunologischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin zur Früherkennung einer Schwangerschaft. Mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern wird hCG im Urin selektiv nachgewiesen. Durch seine hohe Sensitivität von 20 mIU/ml ist der INTEX[®] GRAVI-HCG (Streifentest) in der Lage eine Schwangerschaft bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt zuverlässig zu erkennen.

Inhalt der Testpackung:

Der INTEX[®] GRAVI-HCG (Streifentest) enthält 1 Teststreifen und 1 Testanleitung.
Das Trockenmittel im Folienbeutel ist kein Testbestandteil, bitte in den Abfall geben!

Zusätzlich benötigtes Material (nicht mitgeliefert):

Gefäss zur Probengewinnung und Stoppuhr

Testdurchführung:

Sammeln Sie die Urinprobe in einem sauberen, trockenen Gefäss. Es sollte bevorzugt Morgenurin getestet werden, da dieser üblicherweise die höchste Konzentration an hCG aufweist; es können jedoch Urinproben jeder Tageszeit getestet werden.


Der Teststreifen sollte erst danach, unmittelbar vor der Testdurchführung, aus dem Folienbeutel entnommen werden, um eine Kondensation von Feuchtigkeit auf dem Membranstreifen zu vermeiden.

1. Entnehmen Sie den Teststreifen dem Folienbeutel und halten Sie in am blauen Griff.
2. Tauchen Sie den Teststreifen mit dem weissen Ende 15-30 Sekunden in die Probe ein. Der Flüssigkeitsspiegel sollte hierbei die „MAX-Linie“ nicht übersteigen. Legen Sie den Teststreifen anschliessend auf eine saubere Unterlage, die ihm keine Feuchtigkeit entzieht (z.B. auf dem Folienbeutel).
3. Lesen Sie das Resultat nach drei Minuten ab; jedoch spätestens nach 5 Minuten.



Testauswertung:

- **POSITIV:**
Im Ergebnisfenster erscheinen **2 rote Linien**. Zusätzlich zur Kontrolllinie erscheint in der Testregion ein klar zu unterscheidender zweiter starker oder schwächerer Streifen, der die Anwesenheit des Schwangerschaftshormons hCG in der Probe anzeigt.
WICHTIG: Die Farbintensität der Testlinie ist proportional zu hCG-Konzentration in der Probe. Die Testlinie kann daher auch eine schwächere Färbung als die Kontrolllinie aufweisen.
- **NEGATIV:**
Im Ergebnisfenster erscheint nur **eine rote Kontrolllinie**. In der Testregion ist keine Färbung erkennbar.
WICHTIG: Eine sehr niedrige hCG-Konzentration kann dazu führen, dass sich nach längerer Zeit eine dünne Linie in der Testregion zeigt. Das Testergebnis sollte daher nach einer Entwicklungszeit von mehr als 10 Minuten nicht mehr interpretiert werden.

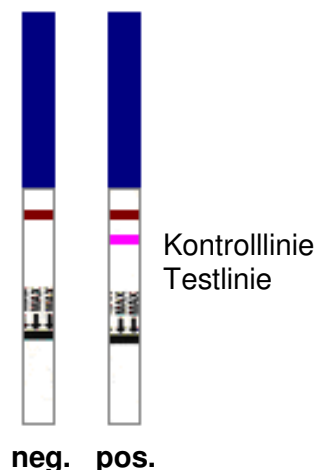

- **UNGÜLTIG:**

Ist keine **rote Kontrolllinie** erkennbar, so ist der Test ungültig.

Meist ist ein zu geringes Probenvolumen oder ein Fehler bei der Durchführung die Ursache für das Nichterscheinen der Kontrolllinie. In diesem Fall wird empfohlen, die Testdurchführung zu überprüfen und den Test mit einem neuen Teststreifen zu wiederholen. Falls sich das Problem auf diese Weise nicht lösen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Ein positives Ergebnis zeigt an, dass Sie schwanger sein könnten. Bitte suchen Sie zur weiteren Beratung Ihren Arzt auf.

Ein negatives Ergebnis sollte nach Ablauf einer Woche und weiterem Ausbleiben der Menstruation erneut mit einem INTEX[®]-GRAVI-HCG Test überprüft werden. Bei einem erneuten negativen Ergebnis suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Bei Fragen zu den Ergebnissen oder falls die Beurteilung eines hCG-Nachweises Probleme bereitet, bitte den Arzt konsultieren.

Fragen und Antworten

Beeinflussen Alkohol, Kaffee oder Speisen das Testergebnis?

Nein

Warum sollte am 1. Tag nach Ausbleiben der Menstruation Morgenurin verwendet werden?

Im Morgenurin ist nach dem längeren Verbleib in der Blase über Nacht hCG angereichert. Dies ist wichtig, um schon am 1. Tag nach Ausbleiben der Menstruation ein sicheres Resultat zu erzielen.

Zeigt eine leichte rosa Färbung bei der Testlinie (T) ebenfalls eine mögliche Schwangerschaft an?

Ja selbst eine leichte rosa Färbung zeigt eine mögliche Schwangerschaft an.

Wann weiss ich, dass der Test funktioniert hat?

Wenn die rosa Kontrolllinie C auftaucht hat der Test funktioniert.

Bitte bedenken Sie, dass bestimmte Medikamente, die hCG enthalten zu einem falschen positiven Resultat führen können.

Wichtige Hinweise:

- Die Testpackung nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden (siehe Datum auf dem Packungskarton)
- Die Packung muss vor Temperaturschwankungen geschützt werden und bei einer Temperatur zwischen 2 und max. 30°C aufbewahrt werden. Der Test selbst muss bei einer Temperatur zwischen 15 und 28°C durchgeführt werden.
- Packung erst kurz vor Gebrauch öffnen.
- Nach Start der Reaktion kein Urin mehr hinzufügen.
- Das Testmaterial ist nicht wieder verwendbar.
- Gebrauchsanweisung vor der Durchführung sorgfältig lesen und genau befolgen.
- Der Test kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Bei Zweifel oder fehlerhafter Handhabung befragen Sie Ihren Arzt.
- Nichts aus der Packung einnehmen.
- Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

INTEX[®] Diagnostika

Artikelnummer:

GH3301S;

INTEX[®] GRAVI-HCG (Streifentest)

Packung mit 1 Teststreifen

Hersteller: INTEX[®] Pharmazeutica AG, Hofackerstrasse 77, CH-4132 Muttenz**INTEX[®] Diagnostika GmbH**

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

IDSAN[®] KFT

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com

Verkauf Österreich:

Mag. Doskar Pharm. Produkte, Schottenring 14, A-1013 Wien, Tel: (0043) 1 535 37 24-0, Fax: (0043) 1 535 37 24-24