

GRAVI-HCG[®]

(cassette test)

Mode d'emploi

In vitro à usage personnel

Lisez le mode d'emploi attentivement avant usage!

1. Introduction

INTEX-Test de grossesse[®] GRAVI HCG est un test qualitatif immunologique rapide de haute sensibilité. Basé sur la méthode d'un anticorps monoclonal, le test détecte la molécule intacte d'hCG dans l'urine et permet ainsi la mise en évidence précoce d'une grossesse. Par sa sensibilité de 20 mIU/ml, une grossesse peut être détectée très tôt et très fiable.

2. Contenu de l'emballage

Le GRAVI-HCG[®] (cassette test) contient 2 cassettes et 1 mode d'emploi. –
Le déshydratant dans le sachet ne concerne en rien le test; prière de l'éliminer!


3. Matériel supplémentaire requis

- récipient pour la collection de l'échantillon
- chronomètre

4. Exécution du test

Collectez une petite quantité d'urine dans un récipient propre exempt de tout résidu ou détergent. Pour le test, l'urine de n'importe quel moment de la journée peut être utilisée; toutefois, la plus forte concentration d'hCG se trouve dans la première urine du matin. Amenez la cassette de test et l'échantillon à température ambiante (18-30 °C) avant de commencer le test.

1. Retirez la cassette du sachet immédiatement avant l'exécution du test pour éviter une condensation d'humidité sur la membrane. Posez la cassette sur une surface propre, sèche et horizontale.
2. Aspirez l'urine à l'aide de la pipette. Tenez la pipette verticalement et pipettez 3 gouttes pleines (120µl) sans bulles d'air dans l'ouverture ronde de la cassette. (voir dessin)
3. Interprétez le résultat après 3 minutes; au plus tard après 5 minutes.

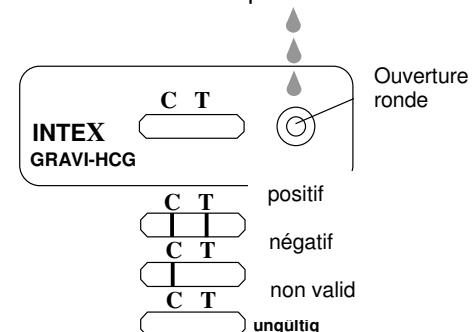

5. Interprétation du test

Fenêtre de lecture:




négatif

Seule la ligne de contrôle (C) apparaît; aucune coloration n'est visible dans la zone de test (T).



positif

En plus de la ligne de contrôle (C) une deuxième ligne bien distincte, d'intensité égale ou plus faible apparaît dans la zone de test (T) démontrant la présence de hCG dans l'échantillon.

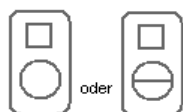

non valid

Aucune coloration n'apparaît dans la zone de contrôle (C): le test n'est pas valable. Le test doit être recommencé avec une nouvelle cassette.

Un résultat positif indique que vous pourriez être enceinte. – Même si la ligne de contrôle est moins colorée, le test est valable. – Consultez votre médecin pour plus de renseignements.

Un résultat négatif devrait être testé avec un nouveau test GRAVI-HCG[®] après 1 semaine si votre menstruation ne commence pas. Si le résultat est de nouveau négatif, consultez votre médecin.

Si vous avez des questions concernant les résultats ou si l'interprétation vous pose des problèmes consultez votre médecin.

6. Questions et réponses

Est-ce que l'alcool, le café ou des repas ont une influence sur le résultat du test?

Non.

Pourquoi dois-je utiliser la première urine du matin pour le test après le premier jour de retard?

La première urine du matin contient plus de hCG parcequ'elle est restée tout la nuit dans la vessie. C'est important car après le premier jour d'absence de la menstruation un résultat fiable peut déjà être obtenu.

Est-ce que une coloration légère dans la zone de test (T) montre une possible grossesse?

Oui, même une coloration légère montre une possible grossesse.









Quand est-ce que je sais si le test a fonctionné?



Quand il y a une ligne rose dans (C) le test a fonctionné.

7. Informations importants

- *N'utilisez pas la boîte de test après la date de péremption (la date est sur l'emballage).*
- *La boîte doit être protégée de variations de température. Elle doit être stockée entre 2-30 °C. L'exécution du test doit être faite entre 15-28 °C.*
- *Ouvrez l'emballage juste un petit peu avant l'exécution.*
- *Après que la réaction a commencé n'ajoutez plus de l'urine.*
- *Ne pas utiliser le même test deux fois.*
- *Le mode d'emploi doit être lu attentivement avant l'exécution du test.*
- *Le test ne remplace pas la visite chez un médecin. Si vous avez des doutes ou si vous n'avez pas effectué le test correctement demandez votre médecin.*
- *Ne pas avaler quelque chose de la boîte.*
- *Conservez la boîte hors d'atteinte des enfants.*

8. SYMBOLES

 REF	No de produit		Usage unique
 LOT	Lot		Date de péremption
	Stockage		Contenu
 IVD	Usage seulement in-vitro		Mode d'emploi

GRAVI-HCG [®]		 REF
	2 cassettes de test	GH3302

 0123

INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutika AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Pharma Hungary Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com

Vente en Autriche: Mag. Doskar Pharm. Produkte, Schottenring 14, A-1013 Wien, Tel: (0043) 1 535 37 24-0, Fax: (0043) 1 535 37 24-24