

GRAVI-HCG[®]

(Kassettentest)

Gebrauchsanweisung

In vitro Diagnostikum zur Eigenanwendung

Testanleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

1. Einführung

Der GRAVI-HCG[®] (Kassettentest) ist ein immunologischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin zur Früherkennung einer Schwangerschaft. Mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern wird hCG im Urin selektiv nachgewiesen. Durch seine hohe Sensitivität von 20 mIU/ml ist der GRAVI-HCG[®] Kassettentest in der Lage, eine Schwangerschaft bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt zuverlässig zu erkennen.

2. Inhalt der Testpackung

Der GRAVI-HCG[®] Kassettentest enthält 2 Testkassetten und 1 Gebrauchsanweisung. – *Das Trockenmittel im Folienbeutel ist kein Testbestandteil, bitte in den Abfall geben!*

3. Zusätzlich benötigtes Material (nicht mitgeliefert)


- Gefäß zur Probengewinnung
- Stoppuhr

4. Testdurchführung

Sammeln Sie die Urinprobe in einem sauberen, trockenen Gefäß. Es sollte bevorzugt Morgenurin getestet werden, da dieser üblicherweise die höchste Konzentration an hCG aufweist; es können jedoch Urinproben jeder Tageszeit getestet werden.


Die Testkassetten sollten erst danach, unmittelbar vor der Testdurchführung, aus dem Folienbeutel entnommen werden, um eine Kondensation von Feuchtigkeit auf den Membranstreifen zu vermeiden.

1. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel und legen Sie diese auf eine saubere, trockene und waagerechte Unterlage.
2. Ziehen Sie mit der Pipette Urin auf, halten Sie die Pipette dabei senkrecht und pipettieren Sie 120 µl (siehe markiertes Volumen oder 3 volle Tropfen) *ohne Luftblasen* in die runde Probenöffnung (siehe Grafik).
3. Lesen Sie das Resultat nach drei Minuten ab; jedoch spätestens nach fünf Minuten.

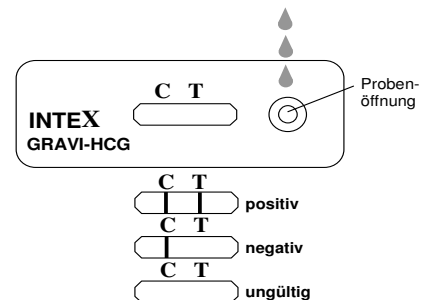

5. Testauswertung

Ergebnisfenster:

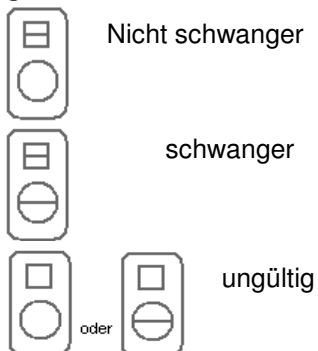

Nur die rosa Kontrolllinie (C) ist sichtbar. Keine Färbung der Testregion (T).

Zusätzlich zur rosa Kontrolllinie (C) erscheint eine gleich starke oder schwächere rosa Testlinie (T).

Ist keine rosa Kontrolllinie zu sehen, so ist der Test ungültig. Neue Testkassette nehmen und Test wiederholen. – Auch wenn die Kontrolllinie schwächer gefärbt ist als die Färbung der Testlinie ist der Test gültig.

Ein positives Ergebnis zeigt an, dass Sie schwanger sein könnten. Bitte suchen Sie zur weiteren Beratung Ihren Arzt auf.

Ein negatives Ergebnis sollte nach Ablauf einer Woche und weiterem Ausbleiben der Menstruation erneut mit einem GRAVI-HCG[®] Test überprüft werden. Bei einem erneuten negativen Ergebnis suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Bei Fragen zu den Ergebnissen oder falls die Beurteilung eines hCG-Nachweises Probleme bereitet, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

6. Fragen und Antworten

Beeinflussen Alkohol, Kaffee oder Speisen das Testergebnis?

Nein.

Warum sollte am 1. Tag nach Ausbleiben der Menstruation Morgenurin verwendet werden?

Im Morgenurin ist nach dem längeren Verbleib in der Blase über Nacht hCG angereichert. Dies ist wichtig, um schon am 1. Tag nach Ausbleiben der Menstruation ein sicheres Resultat zu erzielen.

Zeigt eine leichte rosa Färbung bei der Testlinie (T) ebenfalls eine mögliche Schwangerschaft an?

Ja selbst eine leichte rosa Färbung zeigt eine mögliche Schwangerschaft an.

Wann weiss ich, dass der Test funktioniert hat?









Wenn die rosa Kontrolllinie C auftaucht hat der Test funktioniert.



!!!Bitte bedenken Sie, dass bestimmte Medikamente, die hCG enthalten, zu einem falschen positiven Resultat führen können!!!

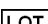7. Wichtige Hinweise

- Die Testpackung nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden (siehe Datum auf dem Packungskarton).
- Die Packung muss vor Temperaturschwankungen geschützt werden und bei einer Temperatur zwischen 2 °C und maximal 30 °C aufbewahrt werden. Der Test selbst muss bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 28 °C durchgeführt werden.
- Packung erst kurz vor Gebrauch öffnen.
- Nach Start der Reaktion kein Urin mehr hinzufügen.
- Das Testmaterial ist nicht wiederverwendbar.
- Gebrauchsanweisung vor der Durchführung sorgfältig lesen und genau befolgen.
- Der Test kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Bei Zweifel oder fehlerhafter Handhabung befragen Sie Ihren Arzt.
- Nichts aus der Packung einnehmen.
- Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Symbolerläuterungen

	Produktnummer		nur zum Einmalgebrauch
	Chargennummer		Verfalldatum
	Lagertemperatur		Inhalt
	nur für in vitro-diagnostische Zwecke		Gebrauchsanweisung

GRAVI-HCG [®]		
	2 Testkassetten	GH3302

 0123

INTEX[®]
Diagnostika

INTEX[®] Pharmazeutica AG

Hofackerstrasse 77
CH-4132 Muttenz
Tel. (0041) 61 465 90 70
Fax (0041) 61 465 90 71
service.ch@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Diagnostika

Hauptstrasse 435
DE-79576 Weil am Rhein
Tel. (0049) 7621 940 90 80
Fax (0049) 7621 940 90 84
service@intex-diagnostika.com

INTEX[®] Pharma Hungary Kft.

Árpád u. 3/b. fdsz. 1
HU-1195 Budapest
Tel. (0036) 1 357 65 98
Fax (0036) 1 357 65 99
intex@t-online.hu

www.intex-diagnostika.com

Vertrieb Österreich: Mag. Doskar Pharm. Produkte, Schottenring 14, A-1013 Wien, Tel: (0043) 1 535 37 24-0, Fax: (0043) 1 535 37 24-24